




TriGO


COMMENT PRENDRE LES MESURES ?



LARGEUR D'ASSISE

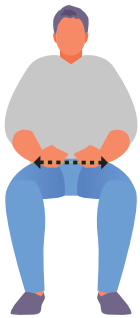


La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane. A l'aide d'une toise ou d'un pied à coulisse, mesurer la distance entre les deux hanches. Prévoyez 2cm de plus que la mesure trouvée.

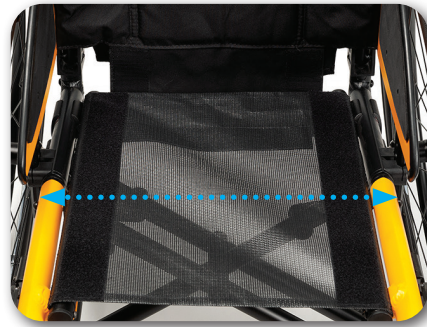

LARGEUR D'ASSISE

Sur votre **Trigo**, la largeur d'assise est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant entre les tubes extérieurs du châssis.

PROFONDEUR D'ASSISE

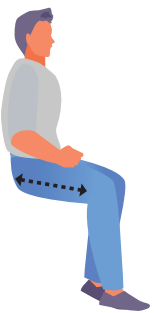


La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane. Prenez la distance entre le bas du dos et le creux poplité (creux du genou). Retirer entre 3 et 4 cm à cette mesure.



PROFONDEUR D'ASSISE

Sur votre **Trigo**, la profondeur d'assise est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant la distance entre le tube du dossier et le bord avant de la toile.

HAUTEUR DE DOSSIER

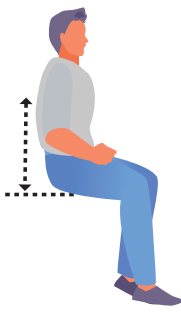


La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane. Mesurez la distance entre l'assise et le milieu des omoplates. Si le patient a besoin d'un maintien important le dossier devra être réglé plus haut que ces mesures, si la personne souhaite avoir une position active cette mesure pourra être inférieure.



HAUTEUR DE DOSSIER

Sur votre **Trigo**, la hauteur de dossier est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant la distance entre la base du tube du dossier et le bord supérieur de la toile de dossier.

LONGUEUR DE JAMBE

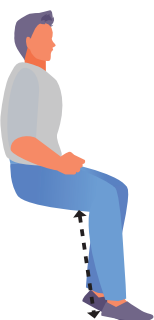


La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane. Prenez la distance entre le creux poplité (creux du genou) et le talon de la personne. Retirez l'épaisseur du coussin choisi à cette mesure.



LONGUEUR DE JAMBE

Sur votre **Trigo**, le longueur de jambes est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant la distance entre l'avant de la toile d'assise et le bord intérieur de la palette de repose-pieds.

HAUTEUR D'ASSISE AVANT /ARRIERE

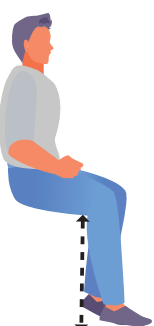

La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane. **Hauteur avant:** Mesurer la distance entre le creux poplité (creux du genou) et le sol. Ajoutez à cette mesure entre 3 et 5 cm afin d'éviter que le ou les repose-pieds ne touchent le sol. **Hauteur arrière:** sera fonction de l'angle d'assise souhaité et de la profondeur d'assise déterminée.



HAUTEUR D'ASSISE AVANT /ARRIERE

Sur votre **Trigo**, la hauteur d'assise avant (flèche bleue) est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant la distance entre le sol et l'avant de la toile. De la même façon, la hauteur d'assise arrière (flèche verte) est obtenue en mesurant la distance entre le sol et l'arrière de la toile.