

Rug L44

1. Ondersteuning rugsteun

De rugsteun van de rolstoel heeft een ophangstelsel met verstelbare velcrobanden om de flexibiliteit van de rugsteun aan te passen.

1. Haal het kussen van de rugsteun door het los te trekken van de velcrobanden.
2. Maak de velcrobanden van het suspensiesysteem los.
3. Trek de banden aan tot de gewenste positie. De spanning van de individuele banden kan aangepast worden om de gewenste ondersteuning van de rug te verkrijgen.
4. Plaats het rugkussen terug over de rugsteun, beginnend aan de voorkant.
5. Beveilig de velcrosluitingen door het kussen met uw hand tegen de rugsteun te duwen.
6. Zorg ervoor dat velcrobanden stevig bevestigd zijn.

